

Anleitung



Arbeitsmittel:

- ERKOTON 20, 200 ml (413 820)
- ERKOTON 30, 200 ml (413 830)
- Farbpaste rot (413 677)
- Farbpaste braun (413 675)
- Farbpaste gelb (413 676)
- Teilbelastungsplatte (510 445)
- LISKO-Polierscheiben, weiss (413 678)
- Staubschutzrohr (413 679)



1. Benötigte Menge ERKOTON mit den jeweiligen Messlöffeln entnehmen. Mischungsverhältnis 1 : 1. Bitte unbedingt auf Markierungen der Behälter und Farben der Löffel achten!




2. ERKOTON Basismasse (braun) Härtermasse (grau) miteinander in Verbindung bringen und zwischen den Fingerspitzen gründlich mischen.




3. Nachdem ERKOTON grob vermischt ist, wird die Masse zwischen den Händen ausgestrichen, bis eine gleichmäßige Farbe erreicht wird. Das Mischen von ERKOTON sollte nach 30 Sek. abgeschlossen sein.




4. Aus der gleichmäßig gemischten Silikonmasse ERKOTON wird nun je nach Anwendung eine Kugel oder ein Strang geformt, um beim Anformen Luft einschüsse und Falten zu vermeiden.

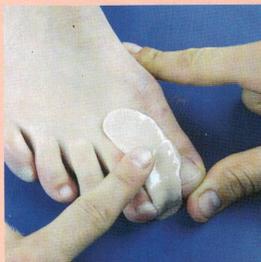


5. Die Kugel bzw. der Strang ERKOTON wird dann durch Verstreichen bzw. Verziehen direkt am Patientenfuß angeformt.

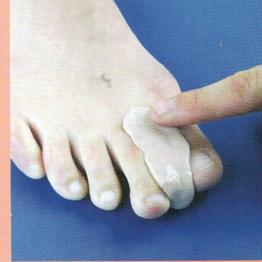


6. Nach Verteilen von ERKOTON dorsal und plantar, muss bei der Herstellung von Zwischenzehenkeilen Die Korrektur des Hallux-valgus gehalten werden, dies geschieht unter Belastung. Evtl. ERKOTON noch mal zwischen Strahl I u. II drücken, um eine möglichst große Korrekturwirkung zu erzielen.

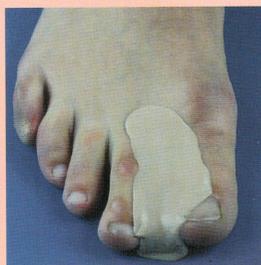

7. Nach ca. 10 Min. kann die Orthese vom Fuß des Patienten abgenommen, beschnitten und beschliffen werden.

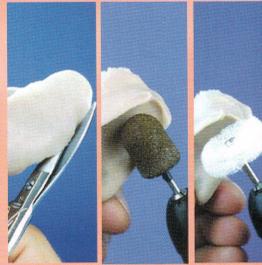

8. Beschneiden lässt sich die Orthese mit normalen Scheren, zum Abtragen können Kappenschleifer (Fußpflege), Bimser und Schleifband (Orthopädie) verwendet werden. Zum Glätten der Oberflächen empfehlen wir Lisko-Polierscheiben fein, weiß (413678)

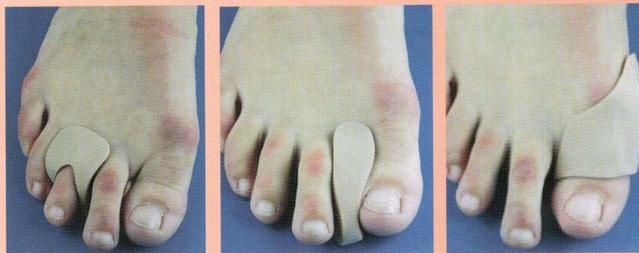

a

b

c

9. Durch das Einfärben mit Farbpasten lassen sich Orthesen der Hautfarbe anpassen.

10. Beispiele verschiedener individuell angefertigter Silikonorthesen:

- a) Reiterzehenorthese,
- b) Zwischenzehen-keil und
- c) Ballenschale.

- ERKOTON nach Gebrauch verschliessen.
- Nicht mit Latex (z. B. Handschuhe) in Verbindung bringen.
- Farbigen Löffel immer mit markiertem Deckel und Behälter benutzen.
- Werden Farbpasten verwendet, zuerst Farbpaste, dann Härterpaste einmischen.

- Mischen von ERKOTON sollte nach 30 Sek. abgeschlossen sein.
- Bei warmer Masse beschleunigte Abbindung.
- Alle Zahlen in Klammern sind Bestellnummern.
- ERKODENT Service-Telefon +49 (0) 74 45 / 85 01-45.