

Eine hervorragende Verbindung...

Die Verbundplatte nora[®] Lunatec combi

nora[®]

→ Aktivier- und Abkühlzeiten



	<i>Aktivierzeit in Minuten</i>	<i>Abkühlzeit in Minuten</i>
Lunatec combi 1	6	12
Lunatec combi 2	9	18
Lunatec combi 3	9	18
Lunatec combi 4	5	10
Lunatec combi 5	3	6
Lunatec combi 6	6	12
Lunatec combi 7	5	10
Lunatec combi 8	6	12
Lunatec combi SK1	5	10
Lunatec combi T1	8	16

→ Tipps und Tricks

Optimale Einstellung des Ofens: 130° C

Hintergrund: bei dieser Einstellung erreicht das Material durchgängig eine optimale Verarbeitungstemperatur. Bitte die unterschiedlichen Aktivierzeiten beachten!

Faustformel: Aktivierzeit x Faktor 2 = optimale Abkühlzeit.

Noch Fragen offen? Dann sprechen Sie uns bitte an...

nora systems GmbH | shoe components | D-69469 Weinheim
Telefon: (+49) 6201 - 80 5486 | Fax: (+49) 6201 - 88 4683
E-Mail: info-schuh@nora.com | Internet: www.nora-schuh.de